

【お手入れ方法

汚れが気になるときは、乾いたやわらかい布でやさしく拭いてください。

※本製品は防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。

【使用上の注意

- 本製品は集音器です。補聴器とは違い医療機器ではありません。補聴器のように、難聴の程度、生活環境、使用環境等に合わせ適切なフィッティングをするための機能は搭載されていません。周囲の音を集音し、増幅する機器です。難聴の方は専門医に相談の上ご使用ください。
- 使用前に音量を最小にしてから装着してください。突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。
- 工事現場等、大きな音のする場所を通るときは、外すなどしてください。
- 本製品を装着後に耳を覆わないでください。
- 歩行中に使用する場合は、特に踏切や交差点など周囲の交通に十分ご注意ください。交通事故の原因になります。
- 屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、使用を中止してください。落雷被害を受ける原因になります。また、防水仕様ではありませんので、雨など水がかからないようにご注意ください。
- 電池は表記どおりに正しくセットしてください。
- お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 付属のイヤホンキャップは別売しておりません。紛失してしまった場合は、形状の合う市販品を購入頂きご使用ください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※数値は当社測定値（一部除く）になります。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なしに変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。

【製品仕様

型番	：SLV002BK
寸法	：約 W24mm × H65mm × D30mm (本体)
質量	：約 15g
使用電池	：LR44 (AG13) ボタン電池 × 2 個 (別売)
電池寿命	：約 16 時間 (音量により異なります)
音量	：120dB (最大出力)
インピーダンス	：120Ω
マイク	：無指向性
集音可能範囲	：3m ~ 5m
付属品	：イヤホンキャップ (S/M/L)、巾着袋
材質	：本体 /ABS 樹脂 イヤホンキャップ/シリコン

以下の症状が出た場合は、ただちに本製品の使用を中止し、専門の医療機関にご相談ください。

- 耳の痛みや不快感を感じた場合
- 耳鳴りやめまいが発生した場合
- 難聴が進んだと感じた場合
- 耳だれが出たり、耳垢が増えたと感じた場合
- 耳の形が変形した場合

耳かけ集音器


取扱説明書

SLV002BK

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、必要とときいつでもご覧頂ける場所に、大切に保管してください。

本製品は安全に配慮して設計されていますが、誤った使い方をされると事故につながり大変危険ですので、必ず正しい使用方法でご使用ください。

【各部名称

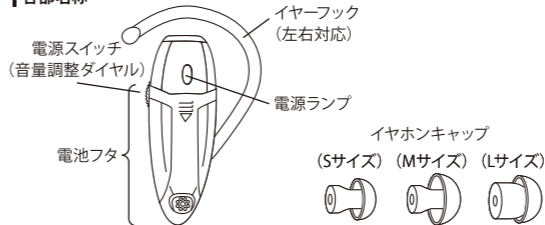


【使い方

- 1 背面の突起に耳穴のサイズに合ったイヤホンキャップを装着します(根元までしっかり差し込んでください)。


- 2 イヤーフックの向きを、使用する耳の向きに合わせてまわし、イヤーフックを曲げてください。

2-1 右耳にかける場合

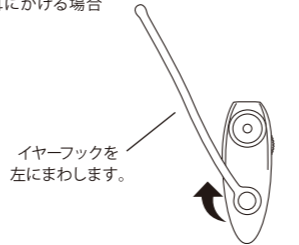

耳の形にイヤーフックを曲げてください。

2-2 左耳にかける場合

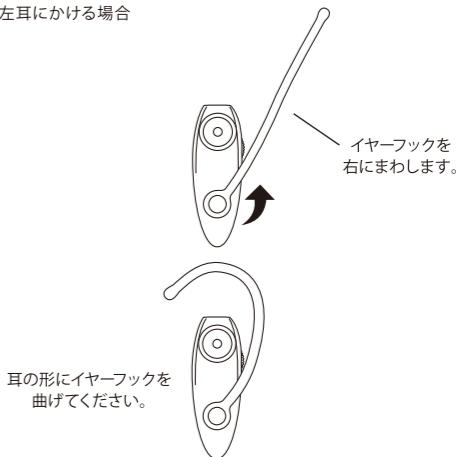

3 電源が「OFF」の状態 で電池フタを開け、電池を入れます。

【電池の入れ方

- 1 三角矢印部分をスライドして電池フタを開けます。
- 2 本体にボタン電池を ⊕ ⊖ の向きを正しく入れます (⊕ が上向きになるように入れてください)。
- 3 電池フタを元通りにカチッとロック音がするまで閉じます。使用中に電池が落下しないよう、電池フタは確実に閉めてください。破損します。

- 4 電池フタを閉じて、音量調整ダイヤルをまわし音量を最小にします。本製品を耳にフィットするように調整し、装着します。

左耳に装着した場合

- 5 音量調整ダイヤルで少しずつ適切な音量に調整します。
※急に音量を上げると聴力障害の原因になりますのでご注意ください。
- 6 使用後は電源スイッチをまわし、電源をOFFにしてください。
※電源ランプが消えていることを確認してください。

YAZAWA CORPORATION
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5615 - 1680
https://www.yazawa.co.jp